



REINIGUNG UND DESINFEKTION VON DENTALABSAUGSYSTEMEN

DENTASEPT® Aspiration AF+

REINIGUNG UND DESINFEKTION VON ABSAUGSYSTEMEN SOWIE AMALGAMABSCHIEDERN UND SPUCKNÄPFEN

Ein hochleistungsfähiges, flüssiges Konzentrat für die tägliche Reinigung und Desinfektion aller Arten von Absaugsystemen, Amalgamabscheidern und Spucknapfen.

- Nicht schäumend
- Sehr wirtschaftliche 2%ige Verdünnung - 5 Liter ergeben 250 Liter gebrauchsfertige Lösung
- Ab 15 Minuten wirksam - aktiv gegen alle behüllten Viren¹



1. Das Robert Koch-Institut empfiehlt die Verwendung von Desinfektionsmitteln mit begrenzter viruzider Aktivität, um die Infektionskette zu unterbrechen. Laut RKI entspricht eine begrenzte viruzide Aktivität (wirksam gegen behüllte Viren) einer Aktivität gegen Vaccinia-Virus und BVDV.

DENTASEPT® Aspiration AF+

Reinigung und Desinfektion von Absaugsystemen, Amalgamabscheidern und Spucknapfen


PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Klare lila Flüssigkeit
- Dichte bei 20°C: 1,062
- pH-Wert des Konzentrats bei 20°C: 10,7
- pH-Wert bei einer Verdünnung auf 2%: 10,9

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor Gebrauch: Geeignete Handschuhe tragen.


Anwendung: Bereiten Sie am Ende des Tages 2 Liter verdünnte Lösung mit dem Dentasept ASP-System vor.

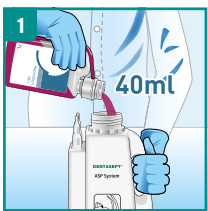


1 Auf 2% verdünnen (40 ml für 2 Liter Wasser).



2 Schütteln Sie das Dentasept® ASP System vorsichtig, um die Lösung zu mischen.

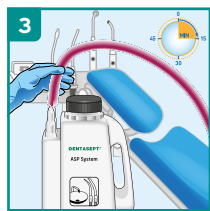

3 Befestigen Sie das Dentasept® ASP System am Saugsystem und saugen Sie die verdünnte Lösung an. Um die Wirksamkeit zu erreichen, sind mindestens 15 Minuten erforderlich. Die Lösung kann über Nacht im System belassen werden.

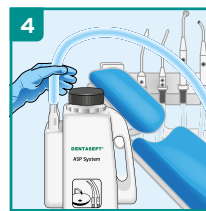

4 Um die Behandlung abzuschließen, füllen Sie das Dentasept® ASP System mit mindestens 1 Liter sauberem Wasser und saugen Sie es an, um das System zu spülen.

Wechseln Sie die verdünnte Lösung mindestens einmal täglich. Jede längere Exposition bei hoher Temperatur (über 35°C) kann eine Farbveränderung bewirken, die jedoch keinen Einfluss auf die antimikrobiellen Eigenschaften hat.

MIKROBIOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

WIRKSAMKEIT	KONZENTRATION	KONTAKTZEIT
Bakterizid* - Gemäß EN 13727/EN 14561	1%	15 min
Levurozid* - Gemäß EN 13624/EN 14562	1%	15 min
Tuberkulozid* - Gemäß EN 14348/EN 14563	1,6%	60 min
Wirksam gegen behüllte Viren* Gemäß EN 14476/EN 17111	2%	15 min

* Hohe Belastung

VERPACKUNGS- UND BESTELLINFORMATIONEN

PRODUKT	VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKELNUMMER
Dentasept Aspiration AF+	3 x 1 L Flasche	3103010
Dentasept Aspiration AF+	1 x 5 L Kanister mit Dosierpumpe	3103030
Dentasept ASP System	-	10055617



D.M.D.
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Vertrieb durch:
ECOLAB GmbH
Rivergate D1/4.OG
Handelskai 92
1200 Wien
Österreich

ANWENDUNGSBEREICH

Reinigung und Desinfektion von Absaugleitungen im zahnärztlichen Bereich. Kompatibel mit verschiedenen Absaugsystemen. Keine Schaumentwicklung.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor Gebrauch: Geeignete Handschuhe tragen.

Anwendung: Bereiten Sie am Ende des Tages 2 Liter verdünnte Lösung mit dem Dentasept ASP-System vor.

1. Auf 2% verdünnen (40 ml für 2 Liter Wasser).
2. Schütteln Sie das Dentasept® ASP System vorsichtig, um die Lösung zu mischen.
3. Befestigen Sie das Dentasept® ASP System am Saugsystem und saugen Sie die verdünnte Lösung an. Um die Wirksamkeit zu erreichen, sind mindestens 15 Minuten erforderlich. Die Lösung kann über Nacht im System belassen werden.
4. Um die Behandlung abzuschließen, füllen Sie das Dentasept® ASP System mit mindestens 1 Liter sauberem Wasser und saugen Sie es an, um das System zu spülen.

Wechseln Sie die verdünnte Lösung mindestens einmal täglich. Jede längere Exposition bei hoher Temperatur (über 35°C) kann eine Farbveränderung bewirken, die jedoch keinen Einfluss auf die antimikrobiellen Eigenschaften hat.

INHALTSSTOFFE

N-(3-Aminopropyl)-N-Dodecylpropan-1,3-Diamin, Tenside, Komplexbildner, Farbstoff und Hilfsstoffe.

LAGERUNG

Gefährlich - Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch (erstellt gemäß den geltenden europäischen Vorschriften für die Einstufung und Kennzeichnung chemischer Produkte). Zwischen +5°C und +25°C lagern.

GUTACHTEN

Medizinprodukt. Die vollständige antimikrobielle Aktivität für Dentasept Aspiration AF+ ist im wissenschaftlichen Dossier enthalten. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

MEDIZINPRODUKTE SICHER VERWENDEN

Bitte lesen Sie die Hinweise und Informationen auf dem Etikett und dem Produktdatenblatt.



NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.



www.anios.com