

## DESINFEKTIONSLösUNG FÜR MEDIZINPRODUKTE IM DENTALBEREICH

### DENTASEPT® SPRAY 60 PRO

#### DESINFEKTIONSLösUNG

Schnelle Desinfektion von zuvor gereinigten, nicht eintauchbaren, nicht-invasiven, alkoholbeständigen, medizinischen Geräten und Medizinprodukten im Dentalbereich.

Gebrauchsfertige Lösung

- Zusammensetzung auf Ethanolbasis
- Breites Wirkspektrum bei kurzer Einwirkzeit
- Hinterlässt beim Trocknen keine Spuren
- Angenehmer Duft
- Ohne Farbstoff



# DENTASEPT® SPRAY 60 PRO

## Desinfektionslösung

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN


- Gebrauchsfertiges Produkt
- Klare, farblose Lösung
- Dichte: ca. 0,9
- pH-Wert bei +20°C: ca. 5,5

### GEBRAUCHSANWEISUNG


Gebrauchsfertig.




Verwendung auf zuvor gereinigten Medizinprodukten. Prüfen Sie vor der Anwendung die Verträglichkeit der zu behandelnden Stellen mit Alkohol. Zu desinfizierende Elektrogeräte sind auszuschalten.

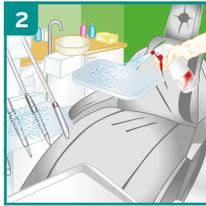

Auf die zu behandelnden Stellen sprühen, bis sie vollständig benetzt sind. In ausreichender Menge auftragen (+/- 40 ml/m<sup>2</sup>). Wichtig ist eine vollständige Benetzung aller zu desinfizierenden Geräte.

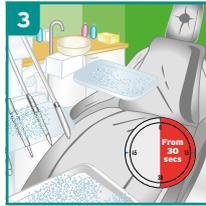

Beachten Sie die angegebene Kontaktzeit für die erforderliche antimikrobielle Aktivität. Spülen ist nicht erforderlich, außer für Bereiche, die mit Haut oder Schleimhaut in Kontakt kommen sollen.

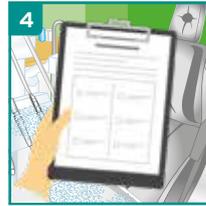

Die Anwendungshäufigkeit ist dem bestehenden Hygieneplan zu entnehmen. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Herstellers zur Desinfektion von Medizinprodukten.

### MIKROBIOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

WIRKSAMKEITEN	KONTAKTZEIT
Bakterizid* - Gemäß EN 13697/EN 13727	30 Sek
Levurozid* - Gemäß EN 13697/EN 13624	30 Sek
Fungizid* - Gemäß EN 13697/EN 13624	5 Min
Tuberkulozid* - Gemäß EN 14348	30 Sek
Mykobakterizid* - Gemäß EN 14348	5 Min
Wirksam gegen behüllte Viren* - Gemäß EN 14476/EN 16777	30 Sek
Begrenztes Spektrum viruzid* - Gemäß EN 14476/EN 16777	5 Min
Adenovirus	30 Sek
Norovirus (MNV)	5 Min

\*geringe Belastung

### VERPACKUNGS- UND BESTELLINFORMATIONEN

PRODUKT	VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKELNUMMER
Dentasept Spray 60 Pro	3 x 1 L Sprühflasche	3126920
Dentasept Spray 60 Pro	1 x 5 L Kanister	3126690



D.M.D.  
1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France

Vertrieb durch:  
**ECOLAB GmbH**  
Rivergate D1/4.OG  
Handelskai 92  
1200 Wien  
Österreich

### ANWENDUNGSBEREICH

Schnelle Desinfektion von zuvor gereinigten, nicht eintauchbaren, nicht-invasiven, alkoholbeständigen medizinischen Geräten und Medizinprodukten im Dentalbereich.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

Gebrauchsfertig.

1. Verwendung auf zuvor gereinigten Medizinprodukten. Prüfen Sie vor der Anwendung die Verträglichkeit der zu behandelnden Stellen mit Alkohol. Zu desinfizierende Elektrogeräte sind auszuschalten.
2. Auf die zu behandelnden Stellen sprühen, bis sie vollständig benetzt sind. In ausreichender Menge auftragen (+/- 40 ml/m<sup>2</sup>). Wichtig ist eine vollständige Benetzung aller zu desinfizierenden Geräte.
3. Beachten Sie die angegebene Kontaktzeit für die erforderliche antimikrobielle Aktivität. Ein Spülen ist nicht erforderlich, außer für Bereiche, die mit Haut oder Schleimhaut in Kontakt kommen sollen.
4. Die Anwendungshäufigkeit ist dem bestehenden Hygieneplan zu entnehmen. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Herstellers zur Desinfektion von Medizinprodukten.

### INHALTSSTOFFE

Ethanol, N,N-Didecyl-N-methylpoly(oxyethyl)-ammoniumpropionat, Parfüm.

### GUTACHTEN

Medizinprodukt. Die volle antimikrobielle Aktivität von Dentasept Spray 60 Pro ist im wissenschaftlichen Dossier enthalten. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

### LAGERUNG

Lagerung: zwischen +5°C und +25°C.

### MEDIZINPRODUKTE SICHER VERWENDEN

Bitte lesen Sie die Informationen und Hinweise auf dem Etikett und dem Produktdatenblatt.



NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.



www.anios.com