

Incidin™ Pro



Konzentrierte Lösung zur schnell wirkenden und effektiven Reinigung und Desinfektion

Konzentrierte Flüssigkeit zur Reinigung und Desinfektion

Aufgrund seiner SMART-BALANCED Formulierung setzt Incidin™ Pro einen neuen Standard für die Oberflächenreinigung und -desinfektion.

- Ihr PRO für Wirksamkeit
- Ihr PRO für Geschwindigkeit
- Ihr PRO für Kompatibilität

BREITES WIRKSPEKTRUM

Incidin Pro ist wirksam gegen Bakterien, Hefen und verschiedenen Viren (einschließlich Noroviren). Es eignet sich für Hochrisikobereiche und eine Vielzahl von Oberflächen, von allgemeinen Krankenstationen und öffentlichen Bereichen bis hin zu Operationssälen und Intensivstationen.

HERVORRAGENDE REINIGUNGSWIRKUNG UND MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

Es wurde ausgiebig auf allen im Gesundheitswesen üblichen Arten von Oberflächen getestet - von Metallen, Linoleum und PVC bis hin zu Keramik, Gummi und Kunststoff - mit hervorragenden Ergebnissen.

ALDEHYDFREIE FORMULIERUNG OHNE PARFÜM UND FARBSTOFF

Die nichtflüchtige, farbstoff- und parfümfreie Formulierung sorgt für eine angenehme Produktanwendung.



Incidin™ Pro

Konzentrierte Flüssigkeit zur Reinigung und Desinfektion



Incidin™ Pro
2 L Flasche



Incidin™ Pro
6 L Kanister

Produkteigenschaften

- Flüssigkeit ist klar, farblos bis hellgelb
- pH-Wert des reinen Produkts bei 20°C: ca. 11,0
- pH-Wert bei Verdünnung mit Leitungswasser (0,5%): ca. 9,5
- pH-Wert bei Verdünnung mit Leitungswasser (2,0%): ca. 10
- Dichte bei 20°C: 1,01 g/ml
- Brechungsindex: 1,385

Mikrobiologische Eigenschaften

Wirksamkeit	Konzentration (%) / (ml/L)	Kontaktzeit
Bakterizid gemäß EN 13727 (0,25%, 5 min) / EN 16615 (1,5%, 5 min & 0,5%, 15 min)	1,5% / 15 0,5% / 5	5 min* 15 min*
Levurozid gemäß EN 13624 (0,25%, 5 min) / EN 16615 (1,5%, 5 min & 0,5%, 15 min)	1,5% / 15 0,5% / 5	5 min* 15 min*
Tuberkulozid und mykobakterizid gemäß EN 14348	1,5% / 15	60 min*
Begrenzt viruzid gemäß EN 14476 (Adenovirus - Norovirus)	2,0% / 20 1,0% / 10	30 min* 60 min*
Aktiv gegen Norovirus gemäß EN 14476	1,5% / 15	30 min*
Aktiv gegen behüllte Viren gemäß EN 14476	1,5% / 15 0,5% / 5	5 min* 30 min*
Flächendesinfektion gem. VAH (bakterizid, levurozid), mit Mechanik	1,0% / 10 0,5% / 5	15 min**/** 30 min**/**
Begrenzt viruzid ****	1,0% / 10	15 min***
Wirksam gegen Adenovirus ****	2,0% / 20	60 min***
Wirksam gegen Norovirus ****	1,5% / 15	30 min***
Wirksam gegen Polyomavirus SV 40 ****	1,5% / 15	15 min***

*hohe Belastung **geringe Belastung *** DVV 2015 (Suspensionstest) **** gem. RKI Empfehlung 10/2022

Verpackungs- und Bestellinformationen

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Incidin™ Pro	3x2 L Flasche	3148468
Incidin™ Pro	6 L Kanister	3140908
Incidin™ Pro	30 L	3139478

Vertrieb durch:

ECOLAB GmbH
Rivergate D1/4.0G
Handelskai 92
1200 Wien
Österreich

www.ecolab.com



0297

ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH

Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany



Anwendungsbereich

Medizinprodukt: konzentrierte Flüssigkeit zur Reinigung und Desinfektion nicht-invasiver Medizinprodukte.

Biozid: für allgemeine Oberflächen.

Gebrauchsanweisung

6L: Verdünnen Sie das Konzentrat mit Wasser (max. 60°C) auf die gewünschte Konzentration. Zum Verdünnen z.B. auf eine Konzentration von 0,5% (5ml/l) geben Sie 40 ml auf 8 Liter Wasser hinzu.

In ausreichender Menge (+/- 30ml/m²) mechanisch auftragen (z.B. durch Wischen). Beachten Sie die empfohlene Kontaktzeit für die erforderliche antimikrobielle Wirksamkeit.

2 L: Verdünnen Sie das Konzentrat mit Wasser (max. 60°C) auf die gewünschte Konzentration. Zum Verdünnen z.B. auf eine Konzentration von 0,25% (2,5 ml/l) in 8 Liter drehen Sie die Flasche einmal um, um einen Schuss von 20 ml hinzuzufügen, für 0,5% (5ml/l) in 8 Liter drehen Sie die Flasche zweimal um, um zwei Schuss von 20 ml hinzuzufügen (insgesamt 40 ml).

In ausreichender Menge (+/- 30ml/m²) mechanisch auftragen (z.B. durch Wischen). Beachten Sie die empfohlene Kontaktzeit für die erforderliche antimikrobielle Wirksamkeit.

Inhaltsstoffe

100 g enthalten: 10,0 g 2-Phenoxyethanol (CAS-Nr. 122-99-6), 8,0 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (Diamin) (CAS-Nr. 2372-82-9) und 7,5 g Alkyl (C12-16)-Dimethylbenzyl-Ammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-C16)) (CAS-Nr. 68424-85-1).

Lagerung

Zwischen 0°C und +25°C.
Von Sonnenlicht fernhalten.
Inhalt vor Feuchtigkeit schützen.

Medizinprodukte und Biozide sicher verwenden

Bitte lesen Sie stets die Hinweise und Informationen auf dem Etikett und dem Produktdatenblatt.



BIOZIDPRODUKT ZUR OBERFLÄCHENDESINFEKTION (GRUPPE 1 - PT2).

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

ECOLAB[®]
PROTECTING WHAT'S VITAL™