

KLARSPÜLER FÜR THERMISCHE BETTPFANNEN WASCHMASCHINEN

Anios LB 30

SAURER KLARSPÜLER FÜR THERMISCHE BETTPFANNEN WASCHMASCHINEN

- Saurer Klarspüler
- Enthält Tenside, die das Trocknen erleichtern
- Erhöhung der Löslichkeit von Kalziumsalzen
- Speziell für die Anwendung in thermischen Bettpfannen Waschmaschinen entwickelt



PRODUKTEIGENSCHAFTEN


- Farblose bis gelbe Flüssigkeit
- pH-Wert des Konzentrats* bei +20°C: ca. 2,1
- pH-Wert verdünnt bei 0,05%*: 4,0
- pH-Wert verdünnt bei 0,3%*: 3,5
- Dichte (Konzentrat) bei +20°C: 1,021g/ml
- Leitfähigkeit bei 0,05% und 0,3%: 471 - 154,8 µS/cm

*pH-Wert-Messungen unter Betriebsbedingungen immer mit einem pH-Meter mit Temperaturkompensation.

VERPACKUNGS- UND BESTELLINFORMATION

PRODUKT	VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKELNUMMER
Anios LB 30 Kanister	2 x 5 L	XXXXXX



LABORATOIRES ANIOS
 1, Rue de l'Espoir
 59260 Lille Lezennes
 France

Vertrieb durch:
ECOLAB GmbH
 Rivergate D1/4.OG
 Handelskai 92
 1200 Wien
 Österreich

ANWENDUNGSGEBIET

Saurer Klarspüler für thermische Bettpfannen Waschmaschinen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Konzentrierte Lösung für den professionellen Einsatz. Verdünnung gemäß dem Bettwaschprogramm (0,5 bis 3 ml/Liter).

INHALTSSTOFFE

Nichtionische und anionische Tenside in saurem Mittel.

LAGERUNG


Gefahr - Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung (erstellt gemäß den geltenden europäischen Vorschriften für die Einstufung und Kennzeichnung chemischer Produkte). Lagerung: zwischen +5°C und +25°C.

GUTACHTEN

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne Gutachten zur Verfügung.

MEDIZINPRODUKTE SICHER VERWENDEN

Bitte lesen Sie das Etikett und die Produktinformation.

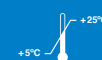

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN
GEBRAUCH.

ECOLAB®

www.ecolab.at