

CHELATBILDNER FÜR THERMISCHE BETTWASCHMASCHINEN

Anios LB 200

KONZENTRIERTES SPÜLMITTEL MIT EINEM LEICHT ALKALISCHEN PH-WERT ZUR ANWENDUNG IN THERMISCHEN WASCHBECKEN

- Kräftiger Chelatbildner in niedrigalkalischen Medien
- Dispergierung von Kalziumsalzen
- Kann in jeder Wasserqualität angewendet werden (Leitungswasser oder aufbereitetes Wasser)
- Ohne EDTA oder NTA
- Phosphatfrei



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Farblose bis gelbe Flüssigkeit
- pH-Wert des Konzentrats bei ca. 9,5
- pH-Wert verdünnt bei 0,05%*: 9,7
- pH-Wert verdünnt bei 0,5%*: 10,4
- Dichte (Konzentrat) bei +20°C: 1,071 g/ml
- Leitfähigkeit bei 0,05% und 0,5%: 54,7 - 468 µS/cm

*pH-Wert-Messungen unter Betriebsbedingungen immer mit einem pH-Meter mit Temperaturkompensation.

VERPACKUNGS- UND BESTELLINFORMATION

PRODUKT	VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKELNUMMER
Anios LB 200 Kanister	2 x 5 L	XXXXXX



LABORATOIRES ANIOS
CE 1, Rue de l'Espoir
59260 Lille Lezennes
France

Vertrieb durch:
ECOLAB GmbH
Rivergate D1/4.OG
Handelskai 92
1200 Wien
Österreich

ANWENDUNGSGBIET

Calciumcarbonat-Sequestrierungs- und Dispergierprodukt für alle Arten von Wasser. Verhindert Kalkablagerungen in und auf dem Gerät. Kompatibel mit Becken, Glas, Edelstahl und Kunststoff Urinflaschen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Konzentrierte Lösung für den professionellen Einsatz. Verdünnung gemäß dem Bettpfannen Waschprogramm (0,5 bis 5 ml/Liter).

INHALTSSTOFFE

Sequestrierungsmittel in einer wässrigen Lösung.

LAGERUNG

Gefahr - Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung (erstellt gemäß den geltenden europäischen Vorschriften für die Einstufung und Kennzeichnung chemischer Produkte). Lagerung: zwischen +5°C und +25°C.

GUTACHTEN

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne Gutachten zur Verfügung.

MEDIZINPRODUKTE SICHER VERWENDEN

Bitte lesen Sie das Etikett und die Produktinformation.



NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN
GEBRAUCH.

ECOLAB®

www.ecolab.at