

Anios LB 200



Enthärter mit Reinigungsfunktion für thermische Steckbecken RDGs

Konzentrierter, schwach alkalischer Reiniger und Klarspüler für die Aufbereitung in thermisch desinfizierenden Steckbeckenspülern

- Komplexbildende Eigenschaften in leicht alkalischem Milieu
- Kalkbindend
- Einsetzbar bei jeder Wasserqualität (Leitungswasser oder aufbereitetes Wasser)
- Frei von EDTA und NTA
- Phosphatfrei



Chemisch-Physikalische Daten

- Klare und farblose bis gelbe Flüssigkeit
- pH-Wert* (Konzentrat) 20°C: ca. 9,5
- pH-Wert* bei 0,05%: 9,7
- pH-Wert* bei 0,5%: 10,4
- Dichte (Konzentrat) 20°C: 1,071 g/mL
- Leitfähigkeit bei 0,05% und 0,5%: 54,7 - 468 µS/cm

*pH-Wert-Messungen unter Betriebsbedingungen mit Hilfe eines pH - Meters mit Temperaturkompensation.

Verpackungs- und bestellinformation

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Anios LB 200	2 x 5 Liter Kanister	3096000



CE LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Vertrieb durch:

ECOLAB GmbH
(REG. HOLDER FOR: A, BG, CZ, HR, HU, RO,
SK, SLO NOSITELJ ODOBRENJA ZA HR)
Rivergate
Handelskai 92
1200 Wien
Österreich

Anwendungsbereich

Sequestrier- und Dispergiermittel für Calciumcarbonat. Beugt Kalkablagerungen im Gerät und am Material vor. Verträglich mit Steckbecken und Urinflaschen aus Glas, Edelstahl und Kunststoffen.

Gebrauchsanweisung

Konzentrierte Lösung. Verdünnung entsprechend der Programmierung des Steckbeckenspülgeräts (von 0,5 bis 5 mL/L), bei hartem Wasser (über 5°TH (3,8°dH)) nicht empfehlenswert; 6,8°fH)).

Zusammensetzung

Sequestriermittel in wässriger Lösung.

Lagerung


Gefährlich - Bitte beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch (erstellt nach den geltenden europäischen Vorschriften zur Einstufung und Kennzeichnung von chemischen Produkten). Lagerung: zwischen +5°C und +25°C.

Gutachten

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

Sichere Verwendung von Medizinprodukten

Lesen Sie die Hinweise und Informationen auf dem Etikett und dem Produktdatenblatt. Jedes schwerwiegende Vorkommnis in Bezug auf das Produkt muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats unverzüglich gemeldet werden.

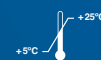

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

ECOLAB[®]
PROTECTING WHAT'S VITAL[™]