



KLARSPÜLER MIT NEUTRALISIERENDER WIRKUNG FÜR IHRE INSTRUMENTE

Anios RDA

NEUTRALISIERENDER KLARSPÜLER UND TROCKNUNGSAKTIVATOR

- Für ein strahlenderes, rückstandsloses Finish
- Kann mit Wasser jeglicher Qualität verwendet werden
- Hohe Kompatibilität mit Polysulfonen (PSU) und thermoplastischen Kunststoffen (Polyoxymethylene/POM)



Anios RDA

Neutralisierender Klarspüler und Trocknungsaktivator



Anios RDA
5 L Kanister

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hellgelbe, klare Flüssigkeit
- pH-Wert* unverdünntes Produkt bei 20°C: min 2,1 - max. 4
- pH-Wert* bei Verdünnung auf 0,03%: ca. 4
- pH-Wert* bei Verdünnung auf 0,1%: ca. 3,6
- Dichte bei 20°C: 1,035
- Leitfähigkeit bei 0,03% - 0,1%: 67 - 139 $\mu\text{S}/\text{cm}$

*pH-Wert-Messungen unter Betriebsbedingungen immer mit einem pH-Meter mit Temperaturkompensation

VERPACKUNGS- UND BESTELLINFORMATION

PRODUKT	VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKELNUMMER
Anios RDA	2 x 5 L Kanister	3102550

ANWENDUNGSBEREICH

Klarspüler für medizinische und chirurgische Instrumente und Medizinprodukte in einer automatischen Anlage, die mit durch Osmose gereinigtem oder nicht durch Osmose gereinigtem Wasser versorgt wird. Neutralisierende Wirkung auf alkalische Rückstände von Reinigungsmitteln und Entfernung von mineralischen Rückständen aus dem Wasser während des Waschgangs. Trocknungsaktivator.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Konzentrierte Lösung für den professionellen Einsatz. Während des Spülzyklus in einer Verdünnung von 0,03% bis 0,1% (d. h. 0,3 bis 1 ml pro Liter Wasser) verwenden. Kompatibel mit thermischen Desinfektionszyklen.

INHALTSSTOFFE

Nichtionische und anionische Tenside, Milchsäure, Ethanol und Hilfsstoffe.

LAGERUNG


Gefährlich - Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch (erstellt gemäß den geltenden europäischen Vorschriften für die Klassifikation und Kennzeichnung chemischer Produkte). Lagerung zwischen +5°C und +25°C.

GUTACHTEN

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

MEDIZINPRODUKTE SICHER VERWENDEN

Bitte lesen Sie die Hinweise und Informationen auf dem Etikett und dem Produktdatenblatt.

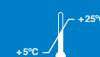

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Vertrieb durch:
ECOLAB GmbH
Rivergate D1/4.OG
Handelskai 92
1200 Wien
Österreich



www.ecolab.at