

Steranios 2%



Steranios 2% und Bandelettes Steranios 2% (Teststreifen)

High-Level-Desinfektionsmittel

- Gebrauchsfertige Lösung: Keine Aktivierung notwendig
- Kontrolle der Konformität der Desinfektionslösung mittels Teststreifen



Steranios 2%

High-Level-Desinfektionsmittel

Produkteigenschaften

- Klare, grüne Lösung
- 2%ige Glutaraldehydlösung gepuffert bei pH 6 (Natriumcitrat)
- Breite Kompatibilität mit allen Arten von Materialien

Gebrauchsanweisung



Vordesinfektionsschritt: Reinigen Sie das Medizinprodukt mit einem Reinigungs- oder Desinfektionsmittel. Gründlich abspülen.

Desinfektionsschritt: Lösung in die Tauchwanne gießen. Für die angestrebte antimikrobielle Wirkung angegebene Einwirkzeit einhalten. Halten Sie das Einweichbad während der Kontaktzeit bedeckt. Kein anderes Produkt STERANIOS 2% hinzugeben.

Gründlich mit sterilem oder gefiltertem Wasser (0,2 µm) abspülen, um alle Spuren des Produkts zu entfernen. Bei endoskopischen Geräten: Spülen Sie die inneren und äußeren Teile des Medizinprodukts.

Mit einem Einweghandtuch trocknen. Halten Sie das Medizinprodukt zur Wiederverwendung so aseptisch wie möglich.

Mikrobiologische eigenschaften

Wirksamkeit	Einwirkzeit
Bakterizid* nach EN 13727/EN 14561*	5 min
Levurozid* nach EN 13624/EN 14562*	5 min
Fungizid* nach EN 13624/EN 14562*	10 min
Tuberkulozid* nach EN 14348/EN 14563*	10 min
Mykobakterizid* nach EN 14348/EN 14563*	10 min
Viruzid* nach EN 14476/EN 17111*	10 min
Sporizid gegen Clostridium difficile* nach EN 17126*	60 min

*=geringe Belastung

Verpackungs- und bestellinformationen

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Steranios 2%	4 x 5 L Kanister	3112070
Steranios 2%	1 x 100 Stück	3112230

CE
0459

Anwendungsgebiet

Hochwertiges Desinfektionsmittel für wärmeempfindliche Instrumente und Endoskopiegeräte.

Gebrauchsanweisung

Gebrauchsfertige Lösung. Nicht verdünnen. Die medizinischen Produkte vor dem Eintauchen in STERANIOS 2% sorgfältig reinigen und abspülen.

1. Vordesinfektionsschritt: Reinigen Sie das Medizinprodukt mit einem Reinigungs- oder Desinfektionsmittel. Gründlich abspülen.
2. Desinfektionsschritt: Lösung in die Tauchwanne gießen. Für die angestrebte antimikrobielle Wirkung angegebene Einwirkzeit einhalten. Halten Sie das Einweichbad während der Kontaktzeit bedeckt. Kein anderes Produkt STERANIOS 2% hinzugeben.
3. Gründlich mit sterilem oder gefiltertem Wasser (0,2 µm) abspülen, um alle Spuren des Produkts zu entfernen. Bei endoskopischen Geräten: Spülen Sie die inneren und äußeren Teile des Medizinprodukts.
4. Mit einem Einweghandtuch trocknen. Halten Sie das Medizinprodukt zur Wiederverwendung so aseptisch wie möglich.

Glutaraldehydgehalt mit einem Teststreifen STERANIOS 2% zu Beginn der Anwendung, bei Wiederaufnahme der Aktivität nach einer Unterbrechung und mindestens einmal täglich überprüfen. Höchstdauer für die Aufbewahrung des Tauchbads: 30 Tage außer für Frankreich 7 Tage.

Inhaltsstoffe

Auf 6 pH gepufferte Glutaraldehydlösung (2%), tensid, Farbstoff und Hilfsstoffe.

Lagerung

Gefährlich - Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch (erstellt gemäß den geltenden europäischen Vorschriften für die Einstufung und Kennzeichnung chemischer Produkte). Lagerung: von +5°C bis +25°C.

Gutachten

Medizinprodukt. Die vollständige antimikrobielle Aktivität von Steranios 2% ist im wissenschaftlichen Dossier enthalten. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

Medizinprodukte sicher verwenden

Bitte lesen Sie die Hinweise und Informationen auf dem Etikett und dem Produktdatenblatt.



NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

Bandelettes Steranios 2% (Teststreifen)

High-Level-Desinfektionsmittel

Einsatzbereich

100 Teststreifen für den Glutaraldehydgehalt in der STERANIOS 2%-Lösung.

Gebrauchsanweisung

- Den Teststreifen eine Sekunde lang eintauchen, dann entnehmen und die überschüssige Flüssigkeit abschütteln
- Ergebnis nach 15 Sekunden:
Gleichmäßig rosa - KONFORM
Rosa orange - NICHT KONFORM
- Nie ein Ergebnis auslesen, das über 30 Sekunden nach dem Eintauchen gewonnen wurde
- Hinweise zur Anwendungshäufigkeit bitte der Gebrauchsanleitung auf dem STERANIOS 2%-Etikett entnehmen

Lagerung

Dose nach jeder Entnahme von Teststreifen wieder verschließen. Feuchtigkeitsgeschützt lagern. Das auf dem Etikett vermerkte Haltbarkeitsdatum beachten. Geöffnet 90 Tage lang haltbar. Lagerung zwischen +5°C bis +25°C.

Vorsichtsmaßnahme bei Gebrauch


Abfälle und Behälter in gesicherter Weise entsorgen. Nur für den professionellen Gebrauch.

CE

Ergebnis nach 15 Sekunden


Konform

Gleichmäßig rosa

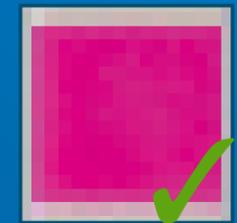

Nicht konform

Rosa orange

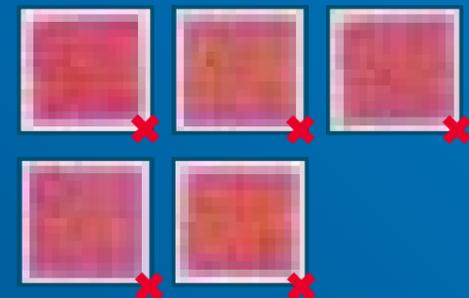

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.



LABORATOIRES ANIOS

1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Vertrieb durch:

ECOLAB GMBH

Rivergate D1/4.OG
Handelskai 92
1200 Wien
Österreich

